


Lampa za pregled CK-907 [PENLIGHT - MINI]

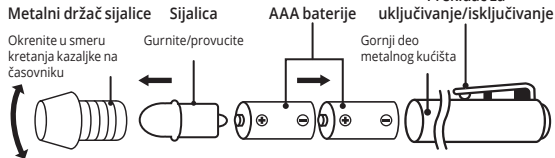

Koristite isključivo odgovarajuće baterije („AAA“ veličina × 2 komada) i sijalicu (3,0 V LED).

Namena

Za dijagnostički postupak oučavanja vidljivih promena i stranih predmeta unutar spoljašnjeg uha, nosa, grla i oka.

Način upotrebe

Odvijte držač sijalice i postavite baterije. Pritisnite prekidač da aktivirate svetlo.

Održavanje

Očistite uređaj pre svake naredne upotrebe. Ne koristite nikakav organski rastvarač za čišćenje uređaja. Uvek isključite proizvod nakon upotrebe.

Upozorenje i predostrožnost

1. Izvadite baterije iz uređaja kada isti nećete koristiti duže vreme
2. Uređaj držite i čuvajte van domašaja dece
3. Nemojte kvasiti ili potapati uređaj u bilo koju tečnost
4. Izbegavajte prekomerno izlaganje uređaja toploti ili direktnom sunčevom svetlu
5. Koristite 2 alkalne baterije od 1,5 V (AAA) identičnog kvaliteta ili tipa
6. Iskorišćene baterije i sijalice odložite na otpad u skladu sa zakonskom regulativom
7. Ne vršite modifikaciju uređaja i opreme
8. Tokom pregleda ne dodirujte lampicu i pacijenta istovremeno
9. Namenjeno za upotrebu od strane profesionalnog kvalifikovanog osoblja i obučениh pojedinaca



Proizvođač 	SPIRIT MEDICAL Co., Ltd. Including CHIN KOU MEDICAL INSTRUMENT Co. 2F, No. 68, Sec. 2, Guo Dao Rd, Luzhou Dist, New Taipei City 24766, TAIWAN
EU-zastupnik EC REP	SKLEP DLA LEKARZA Ul. sw. Szczepana 20a, 61-465 Poznan, POLJSKA sklepdialekarza.com/pl/
Uvoznik / Ovlašćeni predstavnik proizvođača	PRIZMA KRAGUJEVAC DOO Kumanovska 8, 34000 Kragujevac, SRBIJA www.prizma.rs

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Izjavljujemo da je proizvod saobrazan ugovoru u skladu sa članom 50 Zakona o zaštiti potrošača. Zakonski rok saobraznosti iznosi dve godine od datuma kupovine proizvoda, a što se dokazuje fiskalnim ili drugim računom.

Ukoliko je proizvod nesaobrazan zbog neispravnosti komponenti ili drugih nedostataka u radu, isti će biti popravljen ili zamenjen bez novčane nadoknade.

Izjava se ne odnosi na:

- Potrošni materijal: baterije i sijalica
- Oštećenja i neispravnost proizvoda nastala usled:
 - ◆ Mehaničkih oštećenja (krivicom kupca ili treće osobe) i curenja baterija
 - ◆ Nepoštovanja preporuka datih u uputstvu za upotrebu i neodgovarajuće brige o proizvodu
 - ◆ Vršjenja popravki, prepravki ili izmena u strukturi proizvoda od strane neovlašćenih lica
 - ◆ Delovanja više sile ili prirodnih nepogoda kao što su poplave, požari, zemljotresi, udari groma i dr.



ONLINE PRODAVNICA

www.prizma.rs

PRIZMA KRAGUJEVAC DOO

Kragujevac, Kumanovska 8

Telefon: +381 (34) 330 200

Faks: +381 (34) 336 147

E-mail: prizma@prizma.rs



Prizma – prodavnice:

Beograd

- Pop Lukina 12 +381 (11) 328 65 55
- Požeška 80 +381 (11) 655 08 87
- Takovska 18 +381 (11) 655 08 88
- Terazije 35 +381 (11) 655 08 89
- Bulevar Kralja Aleksandra 192 (Đeram) +381 (11) 735 95 15
- Bulevar Kralja Aleksandra 60 +381 (11) 360 73 88

Zemun

- Gospodska 11 +381 (11) 655 87 13
- Maksima Gorkog 8 +381 (13) 219 08 00

Pančevo

Kragujevac

- Kumanovska 8 +381 (34) 330 200
- Dr Zorana Đinđića 9 +381 (34) 353 967
- Kralja Aleksandra I Karađorđevića 58 +381 (34) 356 890

Novi Sad

Subotica

- Šafarikova 9 +381 (21) 661 07 18
- Matka Vukovića 5 +381 (24) 552 926

Niš

- Vožda Karađorđa 10 +381 (18) 250 808

Čačak

- Kuželjeva 25 +381 (32) 515 02 01

Kraljevo

- Cara Lazara 46 +381 (36) 515 00 91

Bosna i Hercegovina

PRIZMA BL d.o.o:

Banja Luka

• Braće Mažar i majke Marije 18

+387 (51) 212 437

Crna Gora – NATIVA d.o.o:

Kotor

• Dobrota bb

+382 (32) 330 835