


Lampa za pregled, sa priključkom za otoskop SPIRIT CK-907A [Instrulite™]

Deluxe višenamenska dijagnostička lampa

Uređaj dvostruke funkcije: lampa za pregled i mini-otoskop sa različitim dimenzijama nastavaka.

Odlikuje se punim fokusom mekog ovetljenja visokog intenziteta i prekidačem na dodir jedinstvenog dizajna.

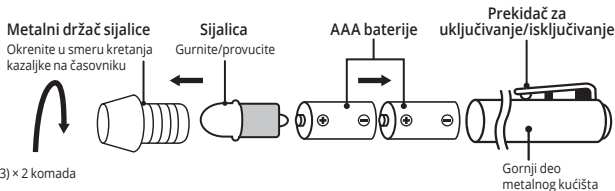

Tip baterija: „AAA“ veličina (R03) × 2 komada

Tip sijalice: LED sijalica 3,0 V

Važno:

- 1) Namenjeno za upotrebu od strane profesionalnog kvalifikovanog osoblja i obučених pojedinaca
- 2) Zakačite uređaj za džep/odeću radi sprečavanja slučajnog pražnjenja baterija tokom nošenja
- 3) Koristite samo odgovarajući tip baterija i sijalice
- 4) Izvadite baterije kada ne koristite uređaj
- 5) Uređaj držite i čuvajte van domašaja dece
- 6) Nemojte kvasiti ili potapati uređaj u bilo koju tečnost
- 7) Koristite samo odgovarajući rastvor za čišćenje
- 8) Izbegavajte prekomerno izlaganje uređaja toploti ili direktnom sunčevom svetlu
- 9) Uređaj čuvati na sobnoj temperaturi
- 10) Iskorišćene baterije i sijalice odložite na otpad u skladu sa zakonskom regulativom



Proizvođač 	SPIRIT MEDICAL Co., Ltd. Including CHIN KOU MEDICAL INSTRUMENT Co. 2F, No. 68, Sec. 2, Guo Dao Rd, Luzhou Dist, New Taipei City 24766, TAJVAN
EU-zastupnik EC REP	SKLEP DLA LEKARZA Ul. sw. Szczepana 20a, 61-465 Poznan, POLJSKA sklepdla lekarza.com/pl/
Uvoznik / Ovlašćeni predstavnik proizvođača	PRIZMA KRAGUJEVAC DOO Kumanovska 8, 34000 Kragujevac, SRBIJA www.prizma.rs

Verzija 1.2 – februar 2021.

Proizvedeno u Tajvanu

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Izjavljujemo da je proizvod saobrazan ugovoru u skladu sa članom 50 Zakona o zaštiti potrošača. Zakonski rok saobraznosti iznosi dve godine od datuma kupovine proizvoda, a što se dokazuje fiskalnim ili drugim računom.

Ukoliko je proizvod nesaobrazan zbog neispravnosti komponenti ili drugih nedostataka u radu, isti će biti popravljen ili zamenjen bez novčane nadoknade.

Izjava se ne odnosi na:

- Potrošni materijal: baterije, sijalica i otoskop-nastavci
- Pribor isporučen uz proizvod: kutija za odlaganje
- Oštećenja i neispravnost proizvoda nastala usled:
 - ◆ Mehaničkih oštećenja (krivicom kupca ili treće osobe) i curenja baterija
 - ◆ Nepoštovanja preporuka datih u uputstvu za upotrebu i neodgovarajuće brige o proizvodu
 - ◆ Vršnja popravki, prepravki ili izmena u strukturi proizvoda od strane neovlašćenih lica
 - ◆ Delovanja više sile ili prirodnih nepogoda kao što su poplave, požari, zemljotresi, udari groma i dr.



ONLINE PRODAVNICA

www.prizma.rs

PRIZMA KRAGUJEVAC DOO

Kragujevac, Kumanovska 8

Telefon: +381 (34) 330 200

Faks: +381 (34) 336 147

E-mail: prizma@prizma.rs



Prizma – prodavnice:

Beograd	• Pop Lukina 12	+381 (11) 328 65 55
	• Požeška 80	+381 (11) 655 08 87
	• Takovska 18	+381 (11) 655 08 88
	• Terazije 35	+381 (11) 655 08 89
	• Bulevar Kralja Aleksandra 192 (Đeram)	+381 (11) 735 95 15
	• Bulevar Kralja Aleksandra 60	+381 (11) 360 73 88
Zemun	• Gospodska 11	+381 (11) 655 87 13
Pančevo	• Maksima Gorkog 8	+381 (13) 219 08 00
Kragujevac	• Kumanovska 8	+381 (34) 330 200
	• Dr Zorana Đinđića 9	+381 (34) 353 967
	• Kralja Aleksandra I Karađorđevića 58	+381 (34) 356 890
Novi Sad	• Šafarikova 9	+381 (21) 661 07 18
Subotica	• Matka Vukovića 5	+381 (24) 552 926
Niš	• Vožda Karađorđa 10	+381 (18) 250 808
Čačak	• Kuželjeva 25	+381 (32) 515 02 01
Kraljevo	• Cara Lazara 46	+381 (36) 515 00 91

Bosna i Hercegovina

PRIZMA BL d.o.o:

Banja Luka

• Braće Mažar i majke Marije 18

+387 (51) 212 437

Crna Gora – NATIVA d.o.o:

Kotor

• Dobrota bb

+382 (32) 330 835